

PERSÖNLICHER IMPLANTATPASS



Bitte gut aufbewahren.

www.gologon.de

Hersteller:

LOGON OMF, Bioactive Systems GmbH, Esslinger Straße 6, 75179 Pforzheim

Distribution Deutschland:

LOGON, Nobel Biocare Deutschland GmbH, Krankenhaus Süd, Im Zollhafen 24, 50678 Köln

Distribution Österreich:

Nobel Biocare Österreich GmbH, Wagenseilgasse 14, 1120 Wien


LOGON

LIEBE PATIENTIN, LIEBER PATIENT,

dieser Implantatpass dokumentiert, dass Sie hochwertige Zahnimplantate von LOGON erhalten haben. Bitte bewahren Sie ihn gut auf und bringen Sie ihn zur Implantatbehandlung mit.

IHR PRAXISTEAM

PERSÖNLICHE ANGABEN

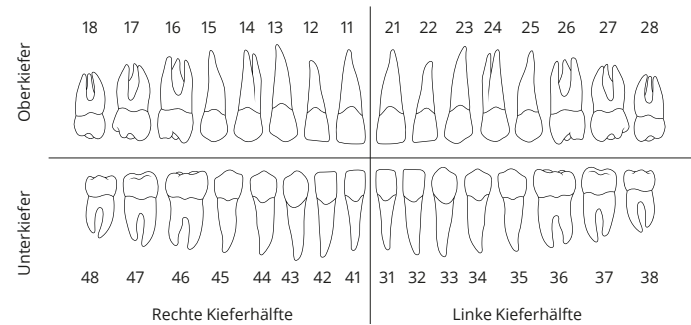

Nachname, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Krankenversicherung

FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT

Eine Implantattherapie dient der Verbesserung der Mundgesundheit und der Steigerung der Lebensqualität. Damit Sie lange Freude an Ihrer Implantatversorgung haben, bitten wir Sie um Beachtung der folgenden Hinweise.





DIREKT NACH DER OPERATION

- Den Operationsbereich äußerlich kühlen.
- Körperliche Anstrengungen und Sport vermeiden.
- Nicht rauchen!
- Keinen Alkohol, Kaffee, Schwarztee und keine Cola trinken.
- Erst wenn Sie wieder volles Gefühl im Operationsbereich haben, können Sie weiche Nahrung zu sich nehmen.

ERSTE WOCHENACH DER IMPLANTATION

- Körperliche Anstrengungen vermeiden.
- Beim regelmäßigen Zähneputzen meiden Sie bitte den Implantatbereich.
- Ebenso beim Gebrauch einer Munddusche oder elektrischen Zahnbürste.
- Spülen Sie nach jedem Essen den Mund vorsichtig mit lauwarmem Wasser aus.
- Vor der Verwendung antibakterieller Mundspüllösungen fragen Sie bitte Ihren Zahnarzt.
- Kauen Sie nicht im Implantatbereich. Falls Sie Prothesenträger sind und Ihre Zahnprothese auf das Operationsgebiet drückt, diese bis zur ersten Kontrolluntersuchung nicht einsetzen.
- Bei Schmerzen, insbesondere klopfender Art, sollten Sie sofort Ihren Zahnarzt aufsuchen.

NACH DEM ZIEHEN DER FÄDEN

- Lassen Sie das Implantat in Ruhe einheilen (nicht mit der Zunge oder den Fingern berühren).
- Putzen Sie den Bereich um das Implantat so, wie es Ihnen Ihr Praxisteam gezeigt hat.

NACH DER FREILEGUNG DES IMPLANTATS

- Beachten Sie die gleichen Vorkehrungen wie in der ersten Woche nach der Implantation.

NACH DER PROTHETISCHEN VERSORGUNG DER IMPLANTATE

- Implantate erfordern eine konsequente Mundhygiene, damit sie langfristig und erfolgreich ihre Funktion erfüllen können. Beachten Sie die Mundhygiene-Instruktionen Ihres Zahnarztes und nutzen Sie die Möglichkeit der professionellen Zahnreinigung (PZR). Lassen Sie Zähne und Implantate regelmäßig überprüfen. Ihr Zahnarzt wird Sie über das Kontrollprogramm informieren.



CHIRURGIE UND **PROTHETIK**

Zu einer hochwertigen Implantatversorgung gehört auch eine lückenlose Dokumentation. Auf den Folgeseiten werden Ihre LOGON-Implantate mittels Aufkleber und den entsprechenden Angaben eindeutig und nachhaltig erfasst.





AUFKLEBER



Praxisstempel

CHIRURGIE MIT EINEM ZAHNIMPLANTAT VON LOGON

Implantationsdatum

Freilegungsdatum

PROTHETIK VON LOGON

Eingliederungsdatum

LOT (Chargen-Nr.)

Aufbau (Typ)

Befestigungsmaterial

Suprastruktur verschraubt zementiert abnehmbar

Praxisstempel



AUFKLEBER



Praxisstempel

CHIRURGIE MIT EINEM ZAHNIMPLANTAT VON LOGON

Implantationsdatum

Freilegungsdatum

PROTHETIK VON LOGON

Eingliederungsdatum

LOT (Chargen-Nr.)

Aufbau (Typ)

Befestigungsmaterial

Suprastruktur verschraubt zementiert abnehmbar

Praxisstempel



AUFKLEBER



Praxisstempel

CHIRURGIE MIT EINEM ZAHNIMPLANTAT VON LOGON

Implantationsdatum

Freilegungsdatum

PROTHETIK VON LOGON

Eingliederungsdatum

LOT (Chargen-Nr.)

Aufbau (Typ)

Befestigungsmaterial

Suprastruktur verschraubt zementiert abnehmbar

Praxisstempel



AUFKLEBER



CHIRURGIE MIT EINEM ZAHNIMPLANTAT VON LOGON

Implantationsdatum

Freilegungsdatum

PROTHETIK VON LOGON

Eingliederungsdatum

LOT (Chargen-Nr.)

Aufbau (Typ)

Befestigungsmaterial

Suprastruktur verschraubt zementiert abnehmbar